

Die SISSEL® Bälle mit SECUREMAX® System bieten Ihnen eine erhöhte Sicherheit während der Anwendung.

Der SISSEL® SECUREMAX® Gymnastikball eignet sich zum Einsatz in Sport, Spiel und Therapie und allen Bereichen mit erhöhtem Qualitäts- und Sicherheitsanspruch.

Die Nutzung in der Rehabilitation, nach einer Operation, bei Wirbelsäulenerkrankungen oder durch Patienten mit mangelnder Compliance sollte nur unter Aufsicht von Fachpersonal erfolgen. Das Besondere des SECUREMAX® Systems ist die Beschaffenheit des verwendeten Materials. Dieses verhindert ein Platzen des Balls bei plötzlichen, punktuellen Beschädigungen (z.B. durch scharfe Gegenstände). Die Luft entweicht in solchen Fällen langsam, es verbleibt genügend Reaktionszeit und das Unfallrisiko wird verringert. Damit die besonderen Eigenschaften des SECUREMAX® Balls wirksam werden, und die Sicherheit bei der Anwendung gewährleistet ist, sind nachstehende Punkte und Anwendungshinweise unbedingt zu beachten.

So bereiten Sie den Ball optimal vor:

- Vor dem Aufpumpen den gut ausgebreiteten Ball 24 Stunden lang gut aufwärmen lassen. Eine Raumtemperatur von ca. 23° C ist ideal. Eine ausreichende Erwärmung erleichtert das Aufpumpen und verhindert Überdehnungen.
- In mehreren Etappen bis 80 % des vorgegebenen Balldurchmessers aufpumpen (nehmen Sie bitte das beigegefügte Massband zu Hilfe). Verwenden Sie dazu am besten eine spezielle Handpumpe (optionales Zubehör) oder einen Blasebalg.
- Gehen Sie in Etappen vor, falls Sie den Ball mit einem Kompressor aufblasen, damit das Material nicht zu schnell gedehnt wird.
- Mindestens 2 Stunden ruhen lassen. Das spezielle Material benötigt etwas mehr Zeit, um sich der Dehnung und dem Innendruck anzupassen, dann bis auf die gewünschte Grösse (verwenden Sie bitte auch hierzu das Massband) und Festigkeit aufpumpen.
- Überschreiten Sie nie den vorgegebenen Balldurchmesser. Bedingt durch das besondere Material kann sich der Ball anfangs noch etwas hart anfühlen oder noch leichte Falten haben. Das ist durchaus normal und legt sich nach kurzer Zeit.
- Nach dem endgültigen Aufpumpen lassen Sie den SECUREMAX® Ball vor der ersten Benutzung 24 Stunden bei Raumtemperatur ruhen.
- Hinweis: Generell verlieren Gymnastikbälle langsam an Luft. Der Durchmesser verringert sich im Monat um 2-3 cm. Dies ist ganz normal und stellt keinen Defekt dar.
- Wichtig: Der Stöpsel muss bis auf Anschlag in den Gymnastikball gesteckt werden. Zum Herausziehen des Stöpsels verwenden Sie bitte den beigegefügte Stöpselheber.

Sicherheitshinweise:

- Halten Sie den Übungsbereich frei von spitzen und scharfen Kanten.
- Kontrollieren Sie regelmässig die Unversehrtheit der Oberfläche.
- Halten Sie den Ball von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen fern.
- Der Ball sollte nicht in direktem Kontakt mit lackierten oder beschichteten Oberflächen kommen.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Vermeiden Sie allzu schwierige Übungen oder Experimente mit erhöhtem Risiko.

Allgemeines:

- Bei Anwendung kann sich die Form des Balls leicht verändern. Nach dem Verlassen nimmt der Ball nach kurzer Zeit wieder seine ursprüngliche Form an.
- Zur Reinigung kann der Ball mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Anschliessend trocken reiben.
- Der Ball darf nur mit Luft gefüllt werden.
- Beschädigte Bälle auf keinen Fall reparieren.
- Der SECUREMAX® Ball ist für eine maximale Belastung von 500 kg vorgesehen. Das maximale Nutzergewicht beträgt 150 kg.
- Die Bälle bestehen aus PVC (phthalatfrei) und sind recyclingfähig.
- Die Bälle erfüllen die Anforderungen des deutschen Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittel-Gesetzbuches (LFGB, resp. EU-Verordnung Nr. 178/2002).
- Desinfizierbar mit handelsüblichem Flächendesinfektionsmittel.

Wichtige Infos, bitte beachten:

SISSEL® Bälle werden mit CITROFOL® BII hergestellt, einem Weichmacher auf Basis nachwachsender Rohstoffe. CITROFOL® stellt eine ausgezeichnete Alternative für Produkte mit hohen Ansprüchen dar. Dies sind Produkte, für die Standardweichmacher (Phthalate) entweder durch Verbot oder gemäss dem Vorsorgeprinzip nicht zum Einsatz kommen sollen. Ihr neuer Ball riecht daher eventuell nach Essig oder Essigreiniger (statt nach „Chemie“), was aber nach einigen Tagen vollständig verflicht.